

Бумага для медицинских регистрирующих приборов в печатных комплектах

UPC-21L UPC-21S

Инструкция по использованию

© 2019 Sony Corporation Printed in Russia

После вскрытия пакета используйте красящую ленту и бумагу как можно скорее

Внимание!

Меры безопасности и дополнительная информация по использованию данного изделия приводятся в инструкции по эксплуатации принтера.



Не используйте повторно

Это может привести к нарушению нормальной работы и отрицательно повлиять на результаты печати.

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с принятыми в медицинской практике нормами, а также соответствующими местными, государственными и федеральными законодательными актами и инструкциями согласно СанПин 2.1.7.2790-10 класса А.

Область применения/Назначение

Применяется только в условиях лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждений, мобильных медицинских комплексов.

Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных комплектах или отдельных упаковках предназначена для печати снимков посредством принтеров Sony UP серии, использующих технологию термопечати. Данный комплект печати предназначен для использования с принтерами UP-20, UP-21MD, UP-25MD, UP-D23MD, UP-D25MD.

Производитель

Сони Корпорейшн 1-7-1, Конач, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония
Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

Место производства

«Sony Storage Media Manufacturing Corporation Tagajo Site»
3-4-1 Sakuragi, Tagajo-shi, Miyagi 985-0842, Japan
Сделано в Японии

Уполномоченный представитель производителя

Акционерное общество «Сони Электроникс»
Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6

Комплектация (1 коробка)

Набор для цветной печати UPC-21L

Содержит цветные красящие ленты и 200 листов бумаги, пригодные для высокоскоростной высокоточной печати, а именно: 4 красящие ленты, каждой из которых хватает для печати 50 листов
4 пачки бумаги (100 × 144 мм) по 50 листов в каждой

Набор для цветной печати UPC-21S

Содержит цветные красящие ленты и 240 листов бумаги, пригодные для высокоскоростной высокоточной печати, а именно: 3 красящие ленты, каждой из которых хватает для печати 80 листов
3 пачки бумаги (90 × 100 мм) по 80 листов в каждой

Характеристики

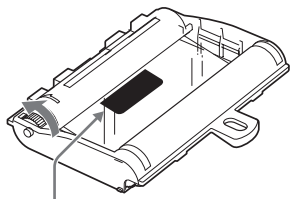
UPC-21L

Размеры 100 мм × 144 мм

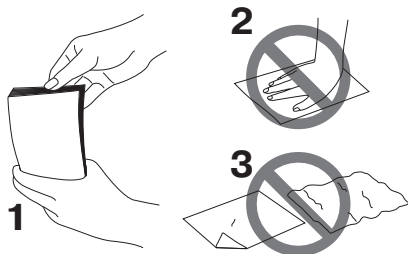
UPC-21S

Размеры 90 мм × 100 мм

Класс потенциального риска 1

A

Метка начального положения

B

Красящая лента

Выньте красящую ленту из пакета. Перед ее установкой в принтер уберите любое провисание, поворачивая шестерню в направлении стрелки, пока не появится метка начального положения (как показано на рис. **A**).

Бумага для печати

- Перед установкой в принтер разделите листы бумаги, быстро пролистнув их пальцем вместе с защитным листом (рис. **B1**).
- Постарайтесь не прикасаться к печатной стороне листов (стороне без напечатанных букв) (рис. **B2**).
- Будьте аккуратны, чтобы не перегнуть или не смять бумагу (рис. **B3**).

Чистящий лист

Для очистки используйте обратную сторону (поверхность, на которой ничего не напечатано) защитного листа. В данном руководстве описывается, как установить защитный лист (чистящий лист) (рис. **C**).

Подробная информация о том, как использовать чистящий лист, приводится в разделе «Очистка термической головки и роликов» инструкции по эксплуатации принтера.

- 1** Выньте бумагу из лотка для бумаги.
- 2** Поместите защитный лист (чистящий лист) в лоток для бумаги напечатанной поверхностью вниз.

Примечание

Используйте красящую ленту и бумагу в коробке, как один комплект. Не смешивайте с другими типами красящей ленты или бумаги. Не следует заменять красящую ленту и рулон бумаги, когда они использованы лишь частично. Это может вызвать проблемы. Указанное выше количество отпечатков не гарантируется. Так как используемые в этой красящей ленте красители могут, подобно другим цветным красителям, выцветать со временем, изделие не будет заменяться и в отношении него не будет гарантироваться отсутствие какого-либо изменения цвета.

Примечания по сохранению отпечатков

- Храните отпечатки в темном и прохладном месте.
- Никогда не приклеивайте на отпечатки клейкую ленту. Также не оставляйте сверху на отпечатке пластиковый ластик и не кладите отпечаток между предметами, которые содержат пластификатор (настольный коврик и т.п.).

C

- Следите за тем, чтобы на отпечатки не попадали любые спиртосодержащие жидкости или другие летучие органические растворители.

Хранение бумаги

- Избегайте хранения бумаги в местах с повышенной температурой, влажностью и запыленностью, а также местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.
- Извлеките частично использованную бумагу и красящую ленту из принтера, запечатайте их в оригинальные пакеты и храните в прохладном темном месте. Во избежание конденсации, прежде чем снова распечатать и использовать бумагу и красящую ленту после хранения, дождитесь, пока они нагреются до комнатной температуры.
- Для хранения частично использованной красящей ленты и бумаги рекомендуется использовать оригинальную упаковку.

Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Температура эксплуатации / транспортировки и хранения:
от 5°C до 30°C / от -20°C до +30°C
Относительная влажность воздуха:
от 30% до 80% (без конденсации)

Техническое обслуживание и ремонт

Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

Гарантии производителя

Производитель не несет ответственности за повреждения или несчастные случаи в результате неправильного использования, ошибки пользователя или внешних чрезвычайных ситуаций. По вопросам качества продукции обращаться к уполномоченному представителю производителя.

Срок годности

3 года от даты производства указанной на упаковке. Рекомендуется хранить в прохладном (но не менее 5°C) и темном месте.

Дата изготовления указана на упаковке изделия в следующем формате: YYYY.MM, где MM – месяц и YYYY – год изготовления.